

高齢者等総合見守りシステム付属品の 「みまもりタグ」の電池交換について

本体の「タグ電池切れ」ランプが点灯し、音声の流れたときは、「みまもりタグ」の電池が減ってきている合図です。

一緒に掲載している「河内長野市高齢者等総合見守りシステム みまもりタグ電池交換取扱説明書」を読んでいただき、「みまもりタグ」の形や電池交換方法を確認してから、電池交換を行ってください。

「みまもりタグ」は本体にテープで貼り付けている場合や、見守りシステムの取扱説明書と一緒に保管していることがあります。

使用する電池はコイン型リチウム電池（型番：CR-2450）1個です。電器店などで購入できます。

すぐに電池の交換ができないときは、本体の「取消」ボタンを長く押すことで一時的に音声を止めることができますが、電池を交換するまで、音声は定期的に流れます。

ご自身や周りの方で、電池を替えることが難しい場合は、「みまもりタグ」と「電池」を市役所にお持ちいただくことで、交換のお手伝いができます。交換方法が分からない場合は、下の電話番号までお問い合わせください。



【電池交換方法問合せ先】（受付時間：平日 9 時～17 時）

河内長野市役所 地域福祉高齢課

電話：0721-53-1111

ALSOK（アルソック） 電話：0721-52-1002

「みまもりタグ」とは……

お出かけの時に持ち歩くことで、「外出しました」とご親族にお知らせすることが出来ます。毎日の「今日も元気です」の連絡の代わりに使えます。

お知らせするためには、ご親族の方のスマートフォンに、ALSOKのアプリを入れていただく必要があります。

アプリの設定方法は、機器設置時にお渡ししている「河内長野市高齢者等総合見守りシステム取扱説明書（S-729）」をご参照ください。